


GEBRAUCHSANWEISUNG

MEHRZWECK-WICKEL FÜR KNIE, ELLENBOGEN UND WADEN FÜR KINDER UND ERWACHSENE

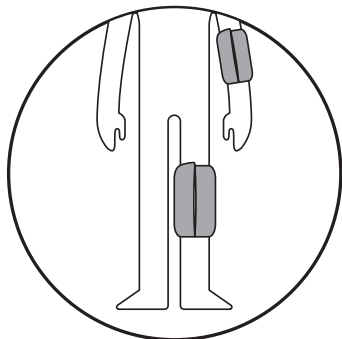

WOFÜR IST DER WICKEL BESTIMMT?

- Hilft bei Gelenk-, Knie- und Ellenbogenschmerzen
- Hemmt Venen-, Gelenk-, Sehnen- und Muskelansatzentzündungen
- Lindert Wachstumsschmerzen im Kniebereich (vor allem bei Kindern)
- Dient zu Nachbehandlung von posttraumatischen und postoperativen Zuständen
- Senkt hohes Fieber
- Hilft wirksam bei rheumatischen Beschwerden
- Hilft bei Unruhe und Schlaflosigkeit (vor allem bei Kindern)

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sorgfältig diese Packungsbeilage durch.

Wir haben uns vom **Prießnitz-Wickel** inspirieren lassen – ein durch Tradition geprüftes und bewährtes natürliches Verfahren, das unsere Großmütter seit seiner Entdeckung durch Vincenz Prießnitz (1799–1851), dem Begründer der sogenannten Hydrotherapie, angewendet haben. Diese bewährte Prozedur verbessert die Durchblutung der betroffenen Stelle, wodurch die Heilungsprozesse im Körper beschleunigt werden.

1. Entfernen Sie den inneren abnehmbare Teil des Wickelgurts, tauchen Sie ihn in kaltes Wasser ein und wringen Sie ihn danach aus (wichtig ist, die Wassertemperatur je nach Zustand des Patienten zu wählen – wenn die Person sehr schwach oder abgemagert ist, wählen Sie nicht zu kaltes Wasser, bei Kindern wählen Sie eine Wassertemperatur um 22 °C).
2. Legen Sie den nassen Teil wieder in den Wickelgurt, indem Sie ihn unter die Gurte schieben.
3. Befestigen Sie den auf diese Weise vorbereitete Wickel mit dem Klettverschluss an der betroffenen Stelle (Knie, Wade, Ellenbogen).

Wenden Sie den Wickel immer direkt auf der Haut an und achten Sie auf eine enge Anhaftung.

Wickel-Anwendungsdauer: Lassen Sie den Wickel 20 - 60 Minuten wirken, wiederholen Sie den Vorgang bis die Beschwerden abklingen, gegebenenfalls wenden Sie sich an Ihren Arzt.

MAMAVIS empfiehlt: bei Gelenkschmerzen verwenden Sie die bewährte Quark- oder Kartoffelpackung. Deren Zubereitung finden Sie unter: www.mamavis.de in der Rubrik Anleitungen / Gelenkschmerzen.

Bei Unruhe und Schlaflosigkeit hat sich der kalte Waden-Umschlag bewährt. Lassen Sie es 10 - 20 Minuten wirken und bei Bedarf wiederholen Sie den Wickel dreimal.

Diese Anwendung wird nur erfahrenen und sachkundigen Anwendern empfohlen.

Überlassen Sie nichts dem Zufall und konsultieren Sie die Verwendung des Wickelgürtels Mamavis eventuell mit Ihrem Arzt.
Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Packungsbeilage.

Mehr Informationen und Anweisungen zur weiteren Verwendung des Wickels finden Sie in unserem E-Shop unter www.mamavis.de, einschließlich Anleitungsvideos.

Das Produkt ist durch das Patentamt geschützt. Eine Herstellung ohne Zustimmung der Patentinhabers ist rechtswidrig.

Diejenigen, die die heilende Wirkung von Naturheilmitteln, wie Kräutern usw. kennen, können der abnehmbare Umschlag auch in ein Kräuterbad eintauchen, eventuell auch mit Kräutersalben, Quark usw. bestreichen. Diese Anwendung wird nur erfahrenen und sachkundigen Anwendern empfohlen.

HINWEISE ZUR PFLEGE UND BEHANDLUNG MAMAVIS-WICKELN:

- Die Wickel können auf übliche Art und Weise in einer Waschmaschine bei 40 °C gewaschen und frei getrocknet werden (beim Trocknen nicht dehnen).
- Wir sparen nicht am Material, deshalb sollte es 3-5 Jahre aushalten, abhängig davon, wie oft die Wickel verwendet werden.

BEI DER VERWENDUNG VON MAMAVIS-PRODUKTEN SIND FOLGENDE GRUNDSÄTZE ZU BEACHTEN:

- Wählen Sie die richtige Größe nach Beratung durch die Fachverkäufer.
- Lassen Sie die Klettverschlüsse am Produkt beim Waschen geschlossen, halten Sie sie sauber (d.h. ohne Fussel, Haare etc.), da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Die Nichtbeachtung der auf dem Produktinformationsschild aufgeführten Symbole oder nach Entfernung des Produktinformationsschildes wird eine eventuelle Reklamation nicht anerkannt.

**Warnung:**

Naturheilmittel-Wickel dürfen nicht an Stellen angelegt werden, die durch Entzündungen, schlecht heilende Wunden oder Hautkrankheiten (Ekzeme usw.) infiziert sind.

Die Einhaltung der oben genannten Grundsätze wird Ihnen eine problemlose Verwendung unseres Produkts zu Ihrer Zufriedenheit ermöglichen.

Unsere Produkte haben Atteste für Kinder unter 3 Jahren. Dieses Prüfungsurteil wurde vom STAATLICHEN GESUNDHEITSINSTITUT auf der Grundlage erfolgreicher Tests abgegeben.

ZUSAMMENSETZUNG DER MAMAVIS-WICKEL:

- Außenschicht: 100% Baumwolle
- Kern: 50% Polyester, 25% Baumwolle, 25% Polyurethan
- Innenschicht: 100% Baumwolle
- Befestigung: Klettverschluss
- Die meisten Wickel bestehen aus einem herausnehmbaren Innenteil aus 100% Baumwolle.

Unsere Mehrzweckwickel helfen bei Therapie, Rehabilitation und Entspannung

- Die obere Schicht bildet ein Gurt aus 100% Baumwolle und antiallergischem Vlies.
- Die mittlere Schicht ist der undurchlässige Teil des Gurtes, der zwischen der oberen und der unteren Schicht platziert ist. Er gewährleistet die Wasserundurchlässigkeit des Materials und hält gleichzeitig die Wärme.
- Die untere Schicht besteht aus einem herausnehmbaren Einsatz aus dünnem saugfähigem Material.