


# GEBRAUCHSANWEISUNG

## MEHRZWECK-WICKEL FÜR SCHULTERGELENK FÜR ERWACHSENE

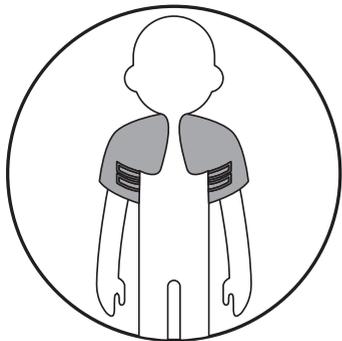

---

### WOFÜR IST DER WICKEL BESTIMMT?

- Hilft wirksam bei rheumatischen Beschwerden
  - Hilft bei Erkältungen
  - Dient zum Durchwärmen von Halswirbelsäule und Schulter
  - Hilft bei Schultergelenk- und Rückenschmerzen in Bereich des Nackens und der Schulterblätter
  - Dient zu Nachbehandlung von posttraumatischen und postoperativen Zuständen
- 

### Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sorgfältig diese Packungsbeilage durch.

Wir haben uns vom **Prießnitz-Wickel** inspirieren lassen – ein durch Tradition geprüftes und bewährtes natürliches Verfahren, das unsere Großmütter seit seiner Entdeckung durch Vincenz Prießnitz (1799–1851), dem Begründer der sogenannten Hydrotherapie, angewendet haben. Diese bewährte Prozedur verbessert die Durchblutung der betroffenen Stelle, wodurch die Heilungsprozesse im Körper beschleunigt werden.

### Mamavis Schultergelenkwickel enthält drei herausnehmbare Innenteile - 2 x Ärmel, 1 x Teil für den oberen Rückenbereich und den Nacken.

Sie können alle drei Teile gleichzeitig oder auch nur einen Umschlag verwenden. Dies hängt von der Art der Beschwerden und vom eigenen Ermessen ab.

1. Entfernen Sie den inneren abnehmbaren Teil des Wickelgurts, tauchen Sie ihn in kaltes Wasser ein und wringen Sie ihn danach aus (wichtig ist, die Wassertemperatur je nach Zustand des Patienten zu wählen - wenn die Person sehr schwach oder abgemagert ist, wählen Sie nicht zu kaltes Wasser).
2. Ziehen Sie die Ärmel an den Armen bis zu den Schultern hoch, führen Sie den dritten Teil unter die Gurte innerhalb des Wickels oder legen Sie ihn direkt auf den oberen Teil des Rückens.
3. Anschließend bringen Sie den Wickel zuerst an einen Arm an und befestigen ihn mit dem Klettverschluss. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Arm und befestigen Sie auch diesen.

**Für eine bessere Vorstellung der eigentlichen Anwendung empfehlen wir die Foto-Anweisungen in unserem E-Shop unter: [www.mamavis.de](http://www.mamavis.de) - Wickel für Schultergelenk anzuschauen.**

**Wenden Sie den Wickel immer direkt auf der Haut an und achten Sie auf eine enge Anhaftung.**

**Wickel-Anwendungsdauer:** Lassen Sie den Wickel 20 - 60 Minuten wirken, wiederholen Sie den Vorgang bis die Beschwerden abklingen, gegebenenfalls wenden Sie sich an Ihren Arzt.

---

Überlassen Sie nichts dem Zufall und konsultieren Sie die Verwendung des Wickelgürtels Mamavis eventuell mit Ihrem Arzt.  
Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Packungsbeilage.

**Mehr Informationen und Anweisungen zur weiteren Verwendung des Wickels finden Sie in unserem E-Shop unter [www.mamavis.de](http://www.mamavis.de), einschließlich Anleitungsvideos.**

Das Produkt ist durch das Patentamt geschützt. Eine Herstellung ohne Zustimmung des Patentinhabers ist rechtswidrig.

Diejenigen, die die heilende Wirkung von Naturheilmitteln, wie Kräutern usw. kennen, können der abnehmbare Umschlag auch in ein Kräuterbad eintauchen, eventuell auch mit Kräutersalben, Quark usw. bestreichen. Diese Anwendung wird nur erfahrenen und sachkundigen Anwendern empfohlen.

## **HINWEISE ZUR PFLEGE UND BEHANDLUNG MAMAVIS-WICKELN:**

- Die Wickel können auf übliche Art und Weise in einer Waschmaschine bei 40 °C gewaschen und frei getrocknet werden (beim Trocknen nicht dehnen).
- Wir sparen nicht am Material, deshalb sollte es 3-5 Jahre aushalten, abhängig davon, wie oft die Wickel verwendet werden.

## **BEI DER VERWENDUNG VON MAMAVIS-PRODUKTEN SIND FOLGENDE GRUNDSÄTZE ZU BEACHTEN:**

- Wählen Sie die richtige Größe nach Beratung durch die Fachverkäufer.
- Lassen Sie die Klettverschlüsse am Produkt beim Waschen geschlossen, halten Sie sie sauber (d.h. ohne Fussel, Haare etc.), da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Die Nichtbeachtung der auf dem Produktinformationsschild aufgeführten Symbole oder nach Entfernung des Produktinformationsschildes wird eine eventuelle Reklamation nicht anerkannt.



### **Warnung:**

Naturheilmittel-Wickel dürfen nicht an Stellen angelegt werden, die durch Entzündungen, schlecht heilende Wunden oder Hautkrankheiten (Ekzeme usw.) infiziert sind.

**Die Einhaltung der oben genannten Grundsätze wird Ihnen eine problemlose Verwendung unseres Produkts zu Ihrer Zufriedenheit ermöglichen.**

**Unsere Produkte haben Atteste für Kinder unter 3 Jahren.** Dieses Prüfungsurteil wurde vom STAATLICHEN GESUNDHEITSINSTITUT auf der Grundlage erfolgreicher Tests abgegeben.

## **ZUSAMMENSETZUNG DER MAMAVIS-WICKEL:**

- Außenschicht: 100% Baumwolle
- Kern: 50% Polyester, 25% Baumwolle, 25% Polyurethan
- Innenschicht: 100% Baumwolle
- Befestigung: Klettverschluss
- Die meisten Wickel bestehen aus einem herausnehmbaren Innenteil aus 100% Baumwolle.

## **Unsere Mehrzweckwickel helfen bei Therapie, Rehabilitation und Entspannung**

- Die obere Schicht bildet ein Gurt aus 100% Baumwolle und antiallergischem Vlies.
- Die mittlere Schicht ist der undurchlässige Teil des Gurtes, der zwischen der oberen und der unteren Schicht platziert ist. Er gewährleistet die Wasserundurchlässigkeit des Materials und hält gleichzeitig die Wärme.
- Die untere Schicht besteht aus einem herausnehmbaren Einsatz aus dünnem saugfähigem Material.