


GEBRAUCHSANWEISUNG MEHRZWECK-HALSWICKEL FÜR KINDER UND ERWACHSENE

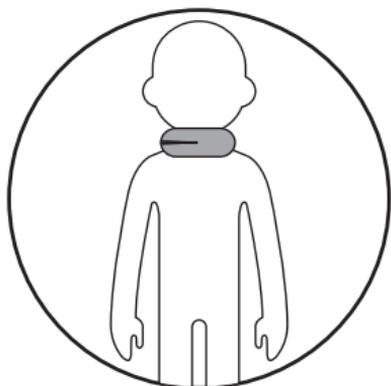

WOFÜR IST DER WICKEL BESTIMMT?

- Schafft Abhilfe bei Halsschmerzen und Kratzen im Hals
- Hilft bei Erkältung
- Hilft bei Schmerzen der Halswirbelsäule
- Schafft Abhilfe bei Angina
- Hilft Kindern bei Laryngitis
- Hemmt Nasen-, Speiseröhre- und Nasenhöhlenentzündung

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sorgfältig diese Packungsbeilage.

Wir haben uns vom Prießnitz-Wickel inspirieren lassen – ein durch Tradition geprüftes und bewährtes natürliches Verfahren, das unsere Großmütter seit seiner Entdeckung durch Vincenz Prießnitz (1799–1851), dem Begründer der sogenannten Hydrotherapie, angewendet haben. Diese bewährte Prozedur verbessert die Durchblutung der betroffenen Stelle, wodurch die Heilungsprozesse im Körper beschleunigt werden.

Wenn Sie unter dem Karpaltunnelsyndrom, einer Sehnenentzündung am Handgelenk oder an rheumatischen Beschwerden leiden, verwenden Sie einen Wickel wie eine Prießnitz-Umschlag.

1. Entfernen Sie den inneren abnehmbaren Teil (Umschlag) des Wickelgurts, tauchen Sie ihn in kaltes Wasser ein (wichtig ist, die Wassertemperatur je nach Zustand des Patienten zu wählen - wenn die Person sehr schwach oder abgemagert ist, wählen Sie nicht zu kaltes Wasser).
2. Fügen Sie den ausgewrungenen Umschlag zurück in den Wickelgurt ein.
3. Umfassen Sie mit dem Gurt die betroffene Stelle und befestigen Sie diesen mit dem Klettverschluss. Der Wickel sollte gut anhaften.

Bei Schmerzen der Halswirbelsäule und der Nackenmuskulatur verwenden Sie einen trockenen, warmen Umschlag in Kombination mit unseren BIO-Buchweizen- oder Kirschkernkissen. Die Kissen können Sie bei den entsprechenden Händlern oder in unserem E-Shop www.mamavis.de kaufen.

1. Legen Sie in diesem Fall den inneren abnehmbaren Teil der Wickel beiseite.
2. Erwärmen Sie 2 Buchweizen- oder Kirschkernkissen auf die maximale Temperatur, die Ihr Körper verträgt. Erwärmen Sie die Kissen in der Mikrowelle, siehe Packungsbeilage für Mamavis Wickelkissen, oder in einem klassischen Backofen, mit einem Bügeleisen oder nur auf der Heizung.
3. Legen Sie die warmen Kissen in die Taschen ein, die in dem Wickel eingenäht sind.
4. Wickeln Sie den so vorbereiteten Wickel um die betroffene Stelle, befestigen Sie diesen mit dem Klettverschluss und gönnen Sie sich dem warmen Wickel so lange, wie es Ihnen angenehm ist.

Wenden Sie der Wickel immer direkt auf der Haut an und achten Sie auf eine enge Anhaftung.

Wickel-Anwendungsdauer: Lassen Sie den Wickel 20 - 60 Minuten wirken. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Beschwerden abklingen, gegebenen Falls wenden Sie sich an Ihren Arzt.

MAMAVIS empfiehlt: Bei Halsschmerzen verwenden Sie die bewährte Quark- oder Zitronenpackung. Ihre Zubereitung finden Sie unter www.mamavis.de in der Rubrik Anleitungen/Halsschmerzen. **Diese Anwendung wird nur erfahrenen und sachkundigen Anwendern empfohlen.**

Überlassen Sie nichts dem Zufall und konsultieren Sie die Verwendung des Wickelgürtels Mamavis eventuell mit Ihrem Arzt.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Packungsbeilage.

Mehr Informationen und Anweisungen zur weiteren Verwendung des Wickels finden Sie in unserem E-Shop unter www.mamavis.de, einschließlich Anleitungsvideos.

Das Produkt ist durch das Patentamt geschützt. Eine Herstellung ohne Zustimmung des Patentinhabers ist rechtswidrig.



WICKEL

NACH VINCENZ PRIESSNITZ

HINWEISE ZUR PFLEGE UND BEHANDLUNG MAMAVIS-WICKELN:

- Die Wickel können auf übliche Art und Weise in einer Waschmaschine bei 40 °C gewaschen und frei getrocknet werden (beim Trocknen nicht dehnen).
- Wir sparen nicht am Material, deshalb sollte es 3-5 Jahre aushalten, abhängig davon, wie oft die Wickel verwendet werden.

BEI DER VERWENDUNG VON MAMAVIS-PRODUKTEN SIND FOLGENDE GRUNDSÄTZE ZU BEACHTEN:

- Wählen Sie die richtige Größe nach Beratung durch die Fachverkäufer.
- Lassen Sie die Klettverschlüsse am Produkt beim Waschen geschlossen, halten Sie sie sauber (d.h. ohne Fussel, Haare etc.), da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Die Nichtbeachtung der auf dem Produktinformationsschild aufgeführten Symbole oder nach Entfernung des Produktinformationsschildes wird eine eventuelle Reklamation nicht anerkannt.



Warnung:

Naturheilmittel-Wickel dürfen nicht an Stellen angelegt werden, die durch Entzündungen, schlecht heilende Wunden oder Hautkrankheiten (Ekzeme usw.) infiziert sind.

Die Einhaltung der oben genannten Grundsätze wird Ihnen eine problemlose Verwendung unseres Produkts zu Ihrer Zufriedenheit ermöglichen.

Unsere Produkte haben Atteste für Kinder unter 3 Jahren. Dieses Prüfungsurteil wurde vom STAATLICHEN GESUNDHEITSINSTITUT auf der Grundlage erfolgreicher Tests abgegeben.

ZUSAMMENSETZUNG DER MAMAVIS-WICKEL:

- Außenschicht: 100% Baumwolle
- Kern: 50% Polyester, 25% Baumwolle, 25% Polyurethan
- Innenschicht: 100% Baumwolle
- Befestigung: Klettverschluss
- Die meisten Wickel bestehen aus einem herausnehmbaren Innenteil aus 100% Baumwolle.

Unsere Mehrzweckwickel helfen bei Therapie, Rehabilitation und Entspannung

- Die obere Schicht bildet ein Gurt aus 100% Baumwolle und antiallergischem Vlies.
- Die mittlere Schicht ist der undurchlässige Teil des Gurtes, der zwischen der oberen und der unteren Schicht platziert ist. Er gewährleistet die Wasserundurchlässigkeit des Materials und hält gleichzeitig die Wärme.
- Die untere Schicht besteht aus einem herausnehmbaren Einsatz aus dünnem saugfähigem Material.

Mamavis healing care s. r. o.

web: www.mamavis.de

www.facebook.com/mamavis.de

Distributor: Castara GmbH, Frapanweg 17, 22589 Hamburg

mamavis@castara.de